

FICHA TÉCNICA

FALMARSEPT® INOX (Toallitas Desinfectantes) **(Cloruro de Benzalconio 0.1%)**

INDICACIONES

FALMARSEPT INOX TOALLITAS DESINFECTANTES está indicado para la desinfección de todo tipo de superficies de equipos médicos hospitalarios y otros materiales metálicos y de goma, así como también en superficies en las que se requiera limpieza y desinfección. Este producto está formulado con anticorrosivos por lo que puede utilizarse en instrumentos metálicos.

FALMARSEPT INOX TOALLITAS DESINFECTANTES, también puede ser utilizado para la limpieza y desinfección de manos y piel.

COMPOSICIÓN

Cloruro de Benzalconio, Nitrito de Sodio, correctivos, Vehículo.

FORMA DE USO

Superficies:

1. Abrir y extraer una toalla del centro del rollo, la siguiente toalla aparecerá automáticamente.
2. Limpiar superficies que se desean desinfectar, utilizar la cantidad de toallas que sean necesarias para dejar húmedas las superficies y dejar secar.
3. Cerrar la tapa para retener la humedad.

Manos y piel:

1. Abrir y extraer una toalla del centro del rollo, la siguiente toalla aparecerá automáticamente.
2. Frotar sobre las manos y piel. (Evitar contacto con ojos y rostro).
3. Cerrar la tapa para retener la humedad.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES

Los jabones ordinarios o detergentes aniónicos pueden hacer que disminuya o se pierda la actividad antimicrobiana de **FALMARSEPT INOX TOALLITAS DESINFECTANTES**. Los desinfectantes que contienen derivados de amonio cuaternario no son tan eficaces para destruir bacterias esporuladas y son ineficaces para algunas cepas resistentes de *Pseudomonas spp.* y *Mycobacterium tuberculosis* y los virus de la hepatitis, por lo que los instrumentos contaminados con estos microorganismos deben ser esterilizados por medio de calor.

Evitar contacto con ojos. Hipersensibilidad al Cloruro de Benzalconio. Mantener fuera del alcance de los niños.

DESCRIPCIÓN

FALMARSEPT® INOX TOALLITAS DESINFECTANTES, es un Antiséptico y desinfectante derivado de amonio cuaternario, con propiedades detergentes y emulsionantes que sanitizan todo tipo de superficies de equipos médicos y de diagnóstico hospitalarios y otros materiales metálicos y de goma, así como también en superficies en las que se requiera limpieza y desinfección. Este producto está formulado con anticorrosivos por lo que puede utilizarse en instrumentos metálicos, y superficies de acero inoxidable. Es efectivo contra la mayoría de bacterias Gram Negativas y Gram Positivas. No es efectivo para esporas y algunas cepas de *Pseudomonas spp.* y de *Mycobacterium tuberculosis* resistentes.

VIA DE ADMINISTRACION

Por contacto de las toallas húmedas con las superficies inertes y sobre la piel.

ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura no mayor a 30°C y mantener los frascos bien cerrados para retener la humedad del producto.

REGISTRO

En proceso de inscripción.

PRESENTACION

Frascos por 100 unidades (14x18 cm) peso neto*: 740.0 g;
Cubeta por 300 unidades (15x20 cm) peso neto*: 2,220.0 g.
*No incluye el peso de las toallitas secas.

PROPIEDADES

MECANISMO DE ACCIÓN

El Cloruro de Benzalconio actúa sobre la membrana celular de las bacterias y algunas clases de virus produciendo cambios en su permeabilidad y la destrucción del microorganismo.

ANTICORROSIVO:

Actúa protegiendo de la degradación las superficies de metal o aleaciones al entrar en contacto con el producto.

Producto Centroamericano
Fabricado en El Salvador
Por Laboratorios FALMAR
www.falmar.biz