



FICHA TÉCNICA

FALMARSEPT® INOX SOLUCIÓN

(Cloruro de Benzalconio 0.1%)

USO PREVISTO

Solución desinfectante con propiedades detergentes, emulsionantes y anticorrosivas. Efectiva contra la mayoría de bacterias Grampositivas, y Gramnegativas, virus y hongos, útil para la desinfección de instrumental médico quirúrgico, contiene anticorrosivo por lo que no daña los metales aún después de mucho tiempo de uso y es de gran utilidad para desinfectar utensilios quirúrgicos, dentales, catéteres, máscaras de anestesia, superficies y otros materiales.

COMPOSICIÓN

Cloruro de Benzalconio, Nitrito de Sodio, Vehículo.

INDICACIONES DE USO

Lavar los instrumentos o superficies, quitarles completamente el jabón o detergente, sumergir los instrumentos o aplicar en las superficies la solución de FALMARSEPT INOX y dejar que actúe por 15 minutos.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES

FALMARSEPT INOX disminuye su efectividad si se utiliza en conjunto con jabones ordinario o detergentes aniónicos. Las bacterias esporuladas, virus de hepatitis, algunas cepas de Pseudomona spp. y Mycobacterium tuberculosis; son resistentes al amonio cuaternario por lo que los elementos contaminados con este tipo de microorganismos deberán ser esterilizados por medio de calor. Cambiar periódicamente (8 -10 días) las soluciones de FALMARSEPT INOX SOLUCIÓN.

Manténgase fuera del alcance de los niños

DESCRIPCIÓN

FALMARSEPT® INOX contiene un derivado de amonio cuaternario, que es un antiséptico y desinfectante con propiedades detergentes y emulsionantes utilizado como agente antibacteriano local de usos múltiples. Es efectivo contra la mayoría de bacterias Gram Negativas y Gram Positivas. Contiene anticorrosivo por lo que no daña los instrumentos metálicos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Tópica cutánea y sobre superficies inertes.

ALMACENAMIENTO

Almacenar a una temperatura no mayor a 30°C en frascos bien cerrados.

VIDA ÚTIL

El tiempo estimado de vida útil del producto FALMARSEPT INOX es de un promedio de 36 meses (3 años).

REGISTRO SANITARIO

El Salvador: IM158117112016

PRESENTACIÓN

Frascos por 250 mL, 450 mL, 500 mL, 750 mL, 850, 1 Litro, 1 Galón, 5 Litros y 200 Litros.

PROPIEDADES

Solubilidad:

Miscible en cualquier proporción con agua.

Mecanismo de acción

El cloruro de benzalconio actúa sobre la membrana celular de las bacterias produciendo cambios en su permeabilidad y la destrucción del microorganismo.

Anticorrosivo:

Actúa protegiendo de la degradación las superficies de metal o aleaciones al entrar en contacto con un fluido.

Producto Centroamericano
Fabricado en El Salvador
Por Laboratorio de Insumos Médicos
Falmar MedicalCare
www.falmar.biz